


biosepar *ANIMAL line*



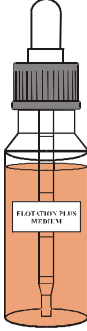



**DAS NEU ENTWICKELTE PARASITOLOGISCHE
DIAGNOSTIK-SYSTEM FÜR DIE VETERINÄRMEDIZIN**

KOTDIAGNOSTIK



KLEINTIERE

ParasiTrap® Flotation PLUS I SA

Bestell-Nr.: 7486 FLOT I SA		(VE = 10, 50 oder 100 Stück/Box)	Komplett-System	
				
Arbeitsröhrchen I	Arbeitsröhrchen II	FixSepar® Flotation PLUS Medium in Tropfflasche	FixSepar® Flotation PLUS Medium	
(gefüllt mit 5,5 ml Medium A FixSepar® Flotationslösung)	(mit integriertem Filtersystem)	(mit graduiertem Tropfer)	(inkl. der notwendigen Mengen)	
				
Stuhllöffel		Verschlußkappe		

Inhaltsangaben der Verpackungen

10-er Verpackung:

- 10 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 5,5 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium
- 10 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 10 Stück Stuhllöffel
- 10 Stück Verschlußkappe
- 1 Stück 30 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium in Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

50-er Verpackung:









- 50 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 5,5 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium
- 50 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 50 Stück Stuhllöffel
- 50 Stück Verschlußkappe
- 1 Stück 125 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium
- 1 Stück 30 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium in Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

100-er Verpackung:

- 100 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 5,5 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium
- 100 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 100 Stück Stuhllöffel
- 100 Stück Verschlußkappe
- 1 Stück 300 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium
- 1 Stück 30 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium in Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

KLEINTIERE

ParasiTrap® Premium Combi-pack Comfort - System FixSepar® ECO

Bestell-Nr.: 7487 ECO		(VE = 10, 50 oder 100 Stück/Box)	Premium Combi-System
			
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A FixSepar® ECO Lösung)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Braunglasflasche (mit graduiertem Tropfer)	Combi-Medium (inkl. der notwendigen Mengen)
			
Stuhllöffel	Einmalpipetten	Wattestäbchen	Verschlußkappe

Inhaltsangaben der Verpackungen

10-er Verpackung:

- 10 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 3,5 ml Medium A FixSepar® ECO
- 10 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 10 Stück Stuhllöffel
- 10 Stück Verschlußkappe
- 10 Stück Einmalpipetten 1 ml
- 10 Stück Wattestäbchen
- 1 Stück 30 ml Combi-Medium in Braunglasflasche
- 1 Stück graduierter Tropfer

50-er Verpackung:

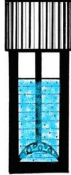

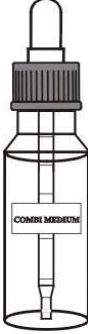





- 50 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 3,5 ml Medium A FixSepar® ECO
- 50 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 50 Stück Stuhllöffel
- 50 Stück Verschlußkappe
- 50 Stück Einmalpipetten 1 ml
- 50 Stück Wattestäbchen
- 1 Stück 75 ml Combi-Medium in Plastikflasche
- 1 Stück Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

100-er Verpackung:

- 100 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 3,5 ml Medium A FixSepar® ECO
- 100 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 100 Stück Stuhllöffel
- 100 Stück Verschlußkappe
- 100 Stück Einmalpipetten 1 ml
- 100 Stück Wattestäbchen
- 1 Stück 150 ml Combi-Medium in Plastikflasche
- 1 Stück Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

KLEINTIERE

ParasiTrap® Premium Combipack Comfort - System AF

Bestell-Nr.: 7488 AF		(VE = 10, 50 oder 100 Stück/Box)		Premium Combi-System	
					
Arbeitsröhrchen I		Arbeitsröhrchen II		Braunglasflasche	
(gefüllt mit 3,5 ml Medium AF Lösung)		(mit integriertem Filtersystem)		(mit graduiertem Tropfer)	
					
Stuhllöffel		Einmalpipetten		Wattestäbchen	
					
				Verschlußkappe	
					
				Combi-Medium	
				(inkl. der notwendigen Mengen)	

Inhaltsangaben der Verpackungen

10-er Verpackung:

10	Stück	Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 3,5 ml Medium AF
10	Stück	Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
10	Stück	Stuhllöffel
10	Stück	Verschlußkappe
10	Stück	Einmalpipetten 1 ml
10	Stück	Wattestäbchen
1	Stück	30 ml Combi-Medium in Braunglasflasche
1	Stück	graduierter Tropfer

50-er Verpackung:



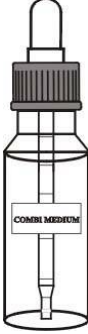





50	Stück	Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 3,5 ml Medium AF
50	Stück	Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
50	Stück	Stuhllöffel
50	Stück	Verschlußkappe
50	Stück	Einmalpipetten 1 ml
50	Stück	Wattestäbchen
1	Stück	75 ml Combi-Medium in Plastikflasche
1	Stück	Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

100-er Verpackung:

100	Stück	Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 3,5 ml Medium AF
100	Stück	Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
100	Stück	Stuhllöffel
100	Stück	Verschlußkappe
100	Stück	Einmalpipetten 1 ml
100	Stück	Wattestäbchen
1	Stück	150 ml Combi-Medium in Plastikflasche
1	Stück	Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

KLEINTIERE

ParasiTrap® Premium Combipack Comfort – System SAF

Bestell-Nr.: 7489 SAF		(VE = 10, 50 oder 100 Stück/Box)		Premium Combi-System	
					
Arbeitsröhrchen I		Arbeitsröhrchen II		Braunglasflasche	
(gefüllt mit 3,5 ml Medium A SAF Lösung)		(mit integriertem Filtersystem)		(mit graduiertem Tropfer)	
					
Stuhllöffel		Einmalpipetten		Wattestäbchen	
					
				Verschlußkappe	
					
				Combi-Medium	
				(inkl. der notwendigen Mengen)	

Inhaltsangaben der Verpackungen

10-er Verpackung:

10	Stück	Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 3,5 ml Medium A SAF
10	Stück	Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
10	Stück	Stuhllöffel
10	Stück	Verschlußkappe
10	Stück	Einmalpipetten 1 ml
10	Stück	Wattestäbchen
1	Stück	30 ml Combi-Medium in Braunglasflasche
1	Stück	graduierter Tropfer

50-er Verpackung:




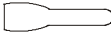




50	Stück	Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 3,5 ml Medium A SAF
50	Stück	Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
50	Stück	Stuhllöffel
50	Stück	Verschlußkappe
10	Stück	Einmalpipetten 1 ml
50	Stück	Wattestäbchen
1	Stück	75 ml Combi-Medium in Plastikflasche
1	Stück	Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

100-er Verpackung:

100	Stück	Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 3,5 ml Medium A SAF
100	Stück	Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
100	Stück	Stuhllöffel
100	Stück	Verschlußkappe
100	Stück	Einmalpipetten 1 ml
100	Stück	Wattestäbchen
1	Stück	150 ml Combi-Medium in Plastikflasche
1	Stück	Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

KLEINTIERE

ParasiTrap® Premium Combipack Comfort – System Bailenger

Bestell-Nr.: 7490 Bailenger		(VE = 10, 50 oder 100 Stück/Box)		Premium Combi-System	
					
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A Bailenger Lösung)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)		Braunglasflasche (mit graduiertem Tropfer)	
					
Stuhllöffel		Einmalpipetten		Wattestäbchen	
					
				Verschlußkappe	
					
				Combi-Medium (inkl. der notwendigen Mengen)	

Inhaltsangaben der Verpackungen

10-er Verpackung:

10	Stück	Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 3,5 ml Medium A Bailenger
10	Stück	Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
10	Stück	Stuhllöffel
10	Stück	Verschlußkappe
10	Stück	Einmalpipetten 1 ml
10	Stück	Wattestäbchen
1	Stück	30 ml Combi-Medium in Braunglasflasche
1	Stück	graduierter Tropfer

50-er Verpackung:








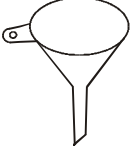

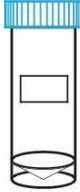
50	Stück	Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 3,5 ml Medium A Bailenger
50	Stück	Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
50	Stück	Stuhllöffel
50	Stück	Verschlußkappe
50	Stück	Einmalpipetten 1 ml
50	Stück	Wattestäbchen
1	Stück	75 ml Combi-Medium in Plastikflasche
1	Stück	Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

100-er Verpackung:

100	Stück	Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 3,5 ml Medium A Bailenger
100	Stück	Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
100	Stück	Stuhllöffel
100	Stück	Verschlußkappe
100	Stück	Einmalpipetten 1 ml
100	Stück	Wattestäbchen
1	Stück	150 ml Combi-Medium in Plastikflasche
1	Stück	Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

GROßTIERE

ParasiTrap® Flotation PLUS II BA DELUXE

Bestell-Nr.: 7491 FLOT II BA		(VE = 10 Stück/Box)	Komplett „DELUXE“ System	
				
Arbeitsröhrchen I (ungefüllt)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)		FixSepar® Flotation PLUS Medium in Braunglasflasche (mit graduiertem Tropfer)
				
Schaufel		Stuhllöffel		Verschlußkappe
				
Probengefäß (vorgefüllt)	Trichter	Filter	Plastikgefäß	



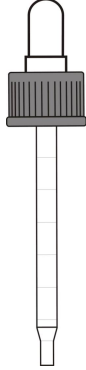





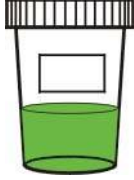
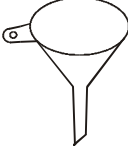
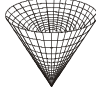
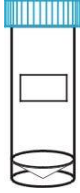

Inhaltsangaben der Verpackungen

10-er Verpackung:

- 10 Stück Arbeitsröhrchen I
- 10 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 10 Stück Stuhllöffel
- 10 Stück Verschlußkappe
- 10 Stück Schaufel
- 10 Stück Trichter
- 10 Stück Einmalfilter
- 10 Stück Plastikgefäß
- 10 Stück Probengefäß mit 30 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium
- 1 Stück 30 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium in Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

GROßTIERE

ParasiTrap[®] ECO Big Animal DELUXE

Bestell-Nr.: 7492 ECO BA		(VE = 10 Stück/Box)	Komplett „DELUXE“ System	
				
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 2 ml Medium A ECO)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Graduierter Tropfer	Combi-Medium	
				
Schaufel	Stuhllöffel	Verschlußkappe	2 Einmalpipetten (1 und 3 ml)	
				
Probengefäß (vorgefüllt)	Trichter	Filter	Plastikgefäß	
				
Wattestäbchen				



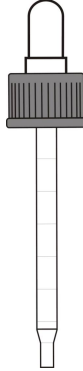





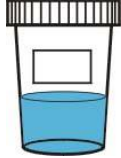
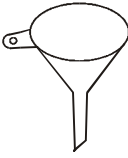
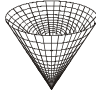
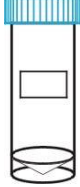

Inhaltsangaben der Verpackungen

10-er Verpackung:

- 10 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 2 ml Medium A FixSepar[®] ECO Lösung
- 10 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 10 Stück Stuhllöffel
- 10 Stück Verschlußkappe
- 10 Stück Schaufel
- 10 Stück Trichter
- 10 Stück Einmalpipetten 1 ml
- 10 Stück Einmalpipetten 3 ml
- 10 Stück Einmalfilter
- 10 Stück Plastikgefäß
- 10 Stück Probengefäß mit 30 ml Medium A FixSepar[®] ECO Lösung
- 10 Stück Wattestäbchen
- 1 Stück 30 ml Combi-Medium in Braunglasflasche
- 1 Stück graduierter Tropfer

GROßTIERE

ParasiTrap® AF Big Animal DELUXE

Bestell-Nr.: 7493 AF BA		(VE = 10 Stück/Box)	Komplett „DELUXE“ System	
				
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 2 ml Medium AF)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Graduierter Tropfer	Combi-Medium	
				
Schaufel	Stuhllöffel	Verschlußkappe	2 Einmalpipetten (1 und 3 ml)	
				
Probengefäß (vorgefüllt)	Trichter	Filter	Plastikgefäß	
				
Wattestäbchen				



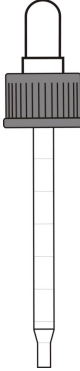





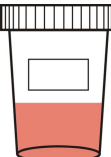
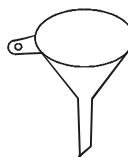
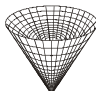
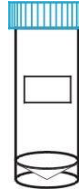

Inhaltsangaben der Verpackungen

10-er Verpackung:

- 10 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 2 ml Medium AF Lösung
- 10 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 10 Stück Stuhllöffel
- 10 Stück Verschlußkappe
- 10 Stück Schaufel
- 10 Stück Trichter
- 10 Stück Einmalpipetten 1 ml
- 10 Stück Einmalpipetten 3 ml
- 10 Stück Einmalfilter
- 10 Stück Plastikgefäß
- 10 Stück Probengefäß mit 30 ml Medium AF Lösung
- 10 Stück Wattestäbchen
- 1 Stück 30 ml Combi-Medium in Braunglasflasche
- 1 Stück graduierter Tropfer

GROßTIERE

ParasiTrap® SAF Big Animal DELUXE

Bestell-Nr.: 7494 SAF BA		(VE = 10 Stück/Box)	Komplett „DELUXE“ System	
				
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 2 ml Medium A SAF)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Graduierter Tropfer	Combi-Medium	
				
Schaufel	Stuhllöffel	Verschlußkappe	2 Einmalpipetten (1 und 3 ml)	
				
Probengefäß (vorgefüllt)	Trichter	Filter	Plastikgefäß	
				
Wattestäbchen				



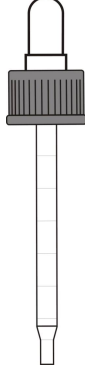





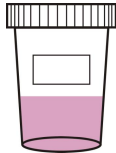
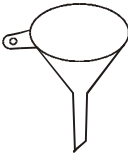

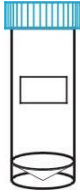

Inhaltsangaben der Verpackungen

10-er Verpackung:

- 10 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 2 ml Medium A SAF Lösung
- 10 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 10 Stück Stuhllöffel
- 10 Stück Verschlußkappe
- 10 Stück Schaufel
- 10 Stück Trichter
- 10 Stück Einmalpipetten 1 ml
- 10 Stück Einmalpipetten 3 ml
- 10 Stück Einmalfilter
- 10 Stück Plastikgefäß
- 10 Stück Probengefäß mit 30 ml Medium A SAF Lösung
- 10 Stück Wattestäbchen
- 1 Stück 30 ml Combi-Medium in Braunglasflasche
- 1 Stück graduierter Tropfer

GROßTIERE

ParasiTrap® Bailenger Big Animal DELUXE

Bestell-Nr.: 7495 Bailenger BA		(VE = 10 Stück/Box)	Komplett „DELUXE“ System	
				
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 2 ml Medium A Bailenger)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Graduierter Tropfer	Combi-Medium	
				
Schaufel	Stuhllöffel	Verschlußkappe	2 Einmalpipetten (1 und 3 ml)	
				
Probengefäß (vorgefüllt)	Trichter	Filter	Plastikgefäß	
				
Wattestäbchen				

Inhaltsangaben der Verpackungen

10-er Verpackung:

- 10 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 2 ml Medium A Bailenger Lösung
- 10 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 10 Stück Stuhllöffel
- 10 Stück Verschlußkappe
- 10 Stück Schaufel
- 10 Stück Trichter
- 10 Stück Einmalpipetten 1 ml
- 10 Stück Einmalpipetten 3 ml
- 10 Stück Einmalfilter
- 10 Stück Plastikgefäß
- 10 Stück Probengefäß mit 30 ml Medium A Bailenger Lösung
- 10 Stück Wattestäbchen
- 1 Stück 30 ml Combi-Medium in Braunglasflasche
- 1 Stück graduierter Tropfer

ECONOMY VERSION FÜR DIE GROßTIER-DIAGNOSTIK

Die Economy-Version von 7491 FLOT II BA, 7492 AF BA, 7493 ECO BA, 7494 SAF BA und 7495 Bailenger BA enthält drei Schaufeln und drei Trichter. Die benutzten Schaufel und Trichter können nach Gebrauch gewaschen, desinfiziert und wieder verwendet werden. Diese Maßnahmen schützen die Umwelt und ersparen Ihnen Kosten. Lassen Sie sich von uns informieren. Ansonsten ist das System wie DELUXE.

Falls Sie mehr Information brauchen, rufen Sie uns an.
Telefon: +49 (0)8631 167 4855

DER BESSERE GEWINNT...



ZUSAMMEN GEHT ALLES BESSER



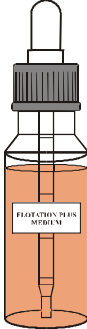
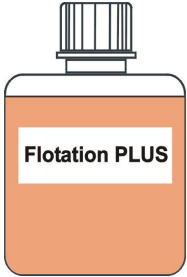
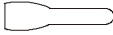

**Das ParasiTrap® Flotation- und Sedimentation-System:
Die perfekten Lösungen für Ihren diagnostischen Erfolg.**


biosepar *HUMAN line*

**DIE MODERNE PARASITOLOGISCHE DIAGNOSTIK
FÜR DIE HUMANMEDIZIN**



ParasiTrap® Flotation PLUS I HU

Bestell-Nr.: 8486 FLOT I HU		(VE = 10, 50 oder 100 Stück/Box)	Komplett-System	
				
Arbeitsröhrchen I	Arbeitsröhrchen II	FixSepar® Flotation PLUS Medium in Tropfflasche	FixSepar® Flotation PLUS Medium	
(gefüllt mit 5,5 ml Medium A FixSepar® Flotationslösung)	(mit integriertem Filtersystem)	(mit graduiertem Tropfer)	(inkl. der notwendigen Mengen)	
				
Stuhllöffel		Verschlußkappe		

Inhaltsangaben der Verpackungen

10-er Verpackung:

- 10 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 5,5 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium
- 10 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 10 Stück Stuhllöffel
- 10 Stück Verschlußkappe
- 1 Stück 30 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium in Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer



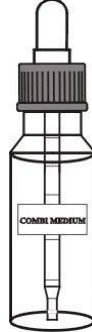





50-er Verpackung:

- 50 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 5,5 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium
- 50 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 50 Stück Stuhllöffel
- 50 Stück Verschlußkappe
- 1 Stück 125 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium
- 1 Stück 30 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium in Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer



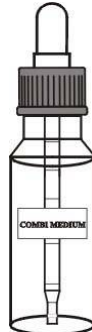





100-er Verpackung:

- 100 Stück Arbeitsröhrchen I, gefüllt mit 5,5 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium
- 100 Stück Arbeitsröhrchen II, mit integriertem Filtersystem
- 100 Stück Stuhllöffel
- 100 Stück Verschlußkappe
- 1 Stück 300 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium
- 1 Stück 30 ml FixSepar® Flotation PLUS Medium in Braunglasflasche mit graduiertem Tropfer

ParasiTrap[®] Human Premium Combipack Comfort - System FixSepar[®] ECO

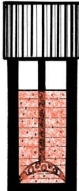

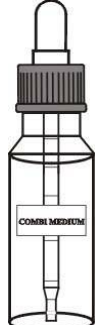





Bestell-Nr.: 8486 ECO	(VE = 50 Stück/Box)*	Premium Combi-System	
			
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A FixSepar [®] ECO Lösung)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Braunglasflasche (mit graduiertem Tropfer)	Combi-Medium (inkl. der notwendigen Mengen)
			
Stuhllöffel	Einmalpipetten	Wattestäbchen	Verschlußkappe

ParasiTrap[®] Human Premium Combipack Comfort - System AF









Bestell-Nr.: 8486 AF	(VE = 50 Stück/Box)*	Premium Combi-System	
			
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium AF Lösung)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Braunglasflasche (mit graduiertem Tropfer)	Combi-Medium (inkl. der notwendigen Mengen)
			
Stuhllöffel	Einmalpipetten	Wattestäbchen	Verschlußkappe

* Auf Wunsch separiert in 50er oder 100er Verpackungseinheiten lieferbar.

ParasiTrap[®] Human Premium Combi-pack Comfort - System SAF

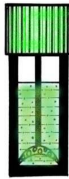

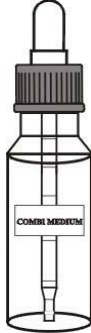

Bestell-Nr.: 8486 SAF		(VE = 50 Stück/Box)*		Premium Combi-System	
					
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A SAF Lösung)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Braunglasflasche (mit graduiertem Tropfer)	Combi-Medium (inkl. der notwendigen Mengen)		
					
Stuhllöffel	Einmalpipetten	Wattestäbchen	Verschlußkappe		

ParasiTrap[®] Human Premium Combi-pack Comfort - System Bailenger



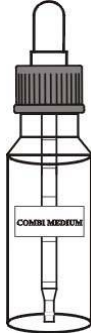

Bestell-Nr.: 8486 Bailenger		(VE = 50 Stück/Box)*		Premium Combi-System	
					
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A Bailenger Lösung)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Braunglasflasche (mit graduiertem Tropfer)	Combi-Medium (inkl. der notwendigen Mengen)		
					
Stuhllöffel	Einmalpipetten	Wattestäbchen	Verschlußkappe		

* Auf Wunsch separiert in 50er oder 100er Verpackungseinheiten lieferbar.

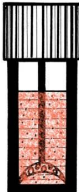

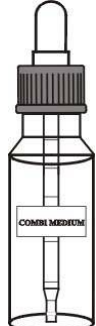

ParasiTrap[®] Super Combipack Comfort - System FixSepar[®] ECO

Bestell-Nr.: 8484 ECO		(VE = 50 Stück/Box)	Super Combi-System	
				
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A FixSepar [®] ECO Lösung)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Braunglasflasche (mit graduiertem Tropfer)	Combi-Medium (inkl. der notwendigen Mengen)	





ParasiTrap[®] Super Combipack Comfort - System AF

Bestell-Nr.: 8484 AF		(VE = 50 Stück/Box)	Super Combi-System	
				
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium AF Lösung)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Braunglasflasche (mit graduiertem Tropfer)	Combi-Medium (inkl. der notwendigen Mengen)	


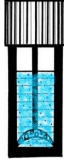
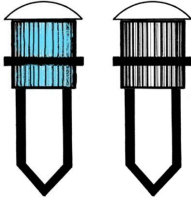





ParasiTrap[®] Super Combipack Comfort – System SAF

Bestell-Nr.: 8484 SAF		(VE = 50 Stück/Box)	Super Combi-System	
				
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A SAF Lösung)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Braunglasflasche (mit graduiertem Tropfer)	Combi-Medium (inkl. der notwendigen Mengen)	



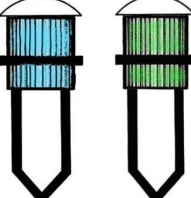





ParasiTrap[®] Super Combipack Comfort - System Bailenger

Bestell-Nr.: 8484 Bailenger		(VE = 50 Stück/Box)	Super Combi-System	
				
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A Bailenger Lösung)	Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Braunglasflasche (mit graduiertem Tropfer)	Combi-Medium (inkl. der notwendigen Mengen)	



ParasiTrap® DUAL Diagnostik System für die Parasitologie

Bestell-Nr.: 8486 DUAL		(VE = 2x25 Stück/Box)	DUAL		
		+		+	
Arbeitsröhrchen I gefüllt mit			Arbeitsröhrchen II		Combi-Medium
25 St. Medium A Bailenger Lösung	25 St. Medium AF oder SAF		25/25 (mit integriertem Filtersystem)		(inkl. der notwendigen Mengen)
			+		
					
Verschlußkappe	Stuhlöffel		Einmalpipetten		Wattestäbchen

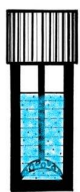

ParasiTrap® DUAL ECO Diagnostik System für die Parasitologie

Bestell-Nr.: 8486 DUAL ECO		(VE = 2x25 Stück/Box)	DUAL ECO		
		+		+	
Arbeitsröhrchen I gefüllt mit			Arbeitsröhrchen II		Combi-Medium
25 St. Medium A Bailenger Lösung	25 St. Medium A FixSepar® ECO		25/25 (mit integriertem Filtersystem)		(inkl. der notwendigen Mengen)
			+		
					
Verschlußkappe	Stuhlöffel		Einmalpipetten		Wattestäbchen



ParasiTrap[®] FixSepar[®] ECO - System

Bestell-Nr.: 8488 ECO	(VE = 50 Stück/Box)	Komplett-System
		
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A FixSepar [®] ECO)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)



ParasiTrap[®] AF - System

Bestell-Nr.: 8488 AF	(VE = 50 Stück/Box)	Komplett-System
		
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium AF)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)

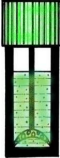
ParasiTrap[®] SAF - System

Bestell-Nr.: 8488 SAF	(VE = 50 Stück/Box)	Komplett-System
		
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A SAF)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)

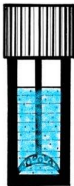
ParasiTrap® Bailenger - System

Bestell-Nr.: 8488 Bailenger	(VE = 50 Stück/Box)	Komplett-System
		
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A Bailenger)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)


ParasiTrap® Einzelne Röhrchen FixSepar® ECO

Bestell-Nr.: 8490 ECO	(VE = 50 Stück/Box)	Arbeitsröhrchen I
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A FixSepar® ECO)		


ParasiTrap® Einzelne Röhrchen AF

Bestell-Nr.: 8490 AF	(VE = 50 Stück/Box)	Arbeitsröhrchen I
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium AF)		


ParasiTrap® Einzelne Röhrchen SAF



Bestell-Nr.: 8490 SAF	(VE = 50 Stück/Box)	Arbeitsröhrchen I
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A SAF)		



ParasiTrap® Einzelne Rührchen Bailenger

Bestell-Nr.: 8490 Bailenger	(VE = 50 Stück/Box)	Arbeitsröhrchen I
<p>Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium A Bailenger)</p>		

ParasiTrap® Ungefülltes System

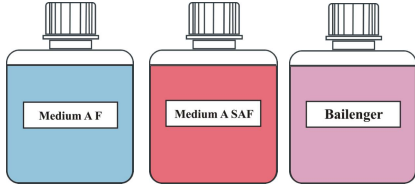
Bestell-Nr.: 8489	(VE = 50 St./Box)	Arbeitsröhrchen I
<p>Arbeitsröhrchen I (ungefüllt)</p>		

Bestell-Nr.: 8487	(VE = 50 Stück/Box)	Ungefülltes System
		
<p>Arbeitsröhrchen I (ungefüllt)</p>		<p>Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)</p>


Bestell-Nr.: 8491	(VE = 50 Stück/Box)	Arbeitsröhrchen II
<p>Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)</p>		

Biosepar Medien für das ParasiTrap® Diagnostik-System


Bestell-Nr.: 8487/AF, 8487/A SAF, 8487/A Bailenger	Medium A
Fixations- und Arbeitsmedium	

	8487/AF	Fixationslösung Formalinhaltig
	8487/A SAF	SAF-Lösung Formalinhaltig
	8487/A Bailenger	Bailenger-Lösung


Bestell-Nr.: 8487/B		Medium B
Trennmedium		

	Ethyl Acetate
--	----------------------

Bestell-Nr.: 8487/C		Medium C
Färbemedium		

	<p style="text-align: center;">ParasiTrap Lugol (Speziell für die Parasitologie hergestellt und modifiziert, bzw. aufkonzentriert. Vorsicht: ätzend!)</p>
---	--

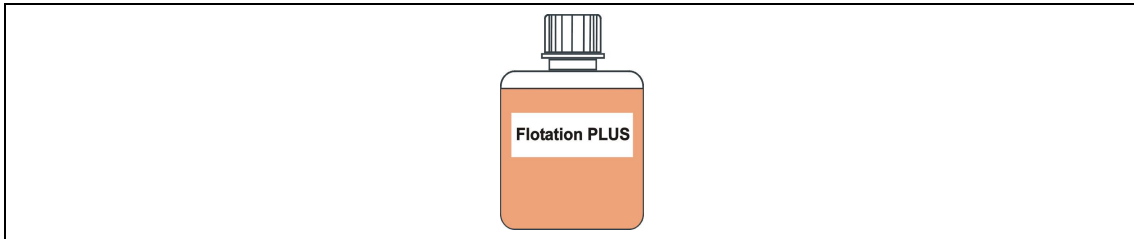
Bestell-Nr.: 8487/CM		Combi-Medium
Kombiniertes Trenn- und Färbemedium		

	<p>Plastikflasche gefüllt mit der neu entwickelten Trenn- und Färbeflüssigkeit für die Parasitologie. Wir empfehlen dazu die Braunglasflasche mit dem graduierten Tropfer zu bestellen (Bestell-Nr.: 8487/E 30).</p>
---	--

**ACHTUNG! Das Medium A FixSepar® ECO ist nur
in vorgefüllten Arbeitsröhrchen I erhältlich!**

Spezielle Arbeitsmedien
für das **ParasiTrap**[®] Diagnostik-System

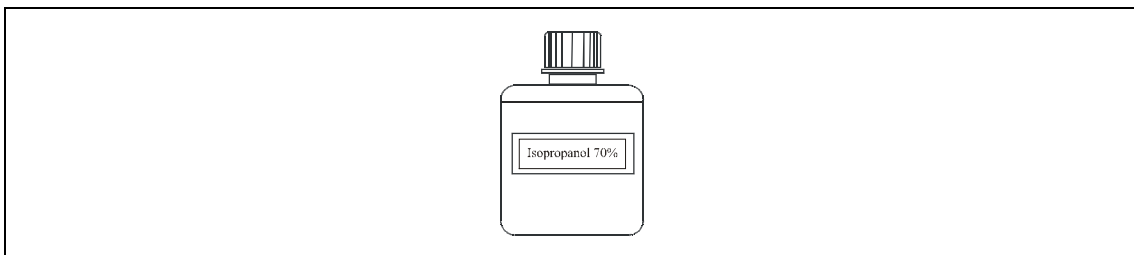
Bestell-Nr.: 8500	Flotationslösung
-------------------	------------------



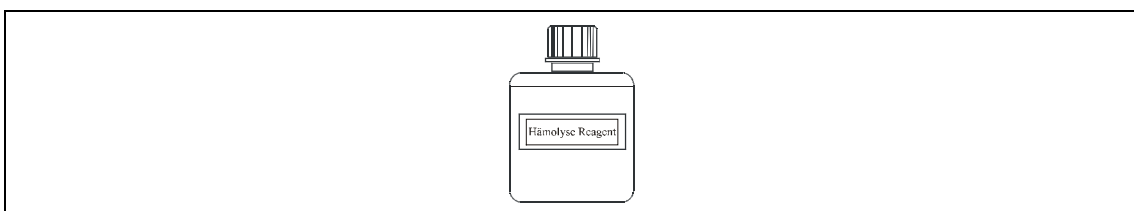
Bestell-Nr.: 8535	Lösung für Materialverdünnung in der parasitologischen Stuhldiagnostik
-------------------	---



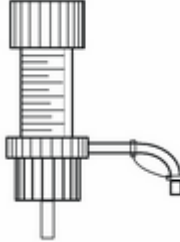
Bestell-Nr.: 8536	Isopropanol 70% - Lösung für Desinfektion
-------------------	---

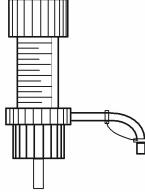


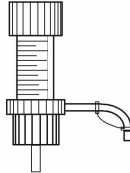
Bestell-Nr.: 8514	Hämolyse-Reagenz
-------------------	------------------



Flaschenaufsatzdispenser




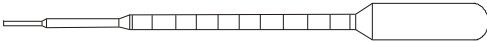

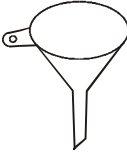
Bestell-Nr.: 8495/A	(VE = 1 Stück)	Flaschenaufsatzdispenser
<p>2,0-10,0 ml (für Medium AF/SAF)</p>		


Bestell-Nr.: 8495/B	(VE = 1 Stück)	Flaschenaufsatzdispenser
<p>1,0-5,0 ml (für Medium B)</p>		

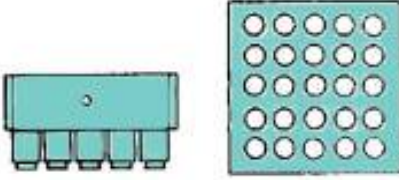
Bestell-Nr.: 8495/C	(VE = 1 Stück)	Flaschenaufsatzdispenser
<p>0,1-1,0 ml (für Medium C)</p>		

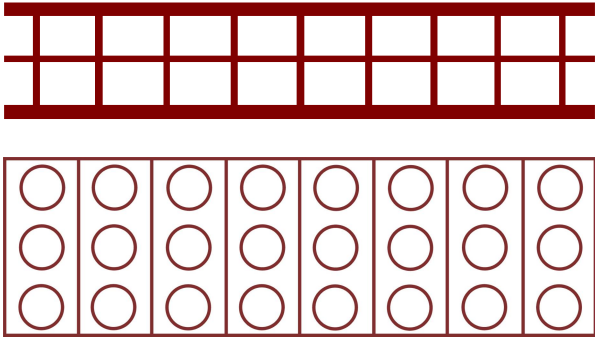
Preisänderungen behalten wir uns auch kurzfristig vor!

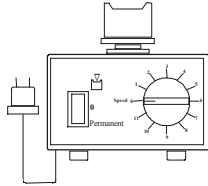
Ergänzendes Zubehör für die Stuhlprobe (Parasitologie)

Bestell-Nr.: 8492	(VE = 50 Stück)	Stuhllöffel
für die Entnahme unter schwierigen Bedingungen		
Bestell-Nr.: 8492 BA	(VE = 50 Stück)	Stuhllöffel
Stuhllöffel für die Grosstierdiagnostik		
Bestell-Nr.: 8493/1	(VE = 50 Stück)	Einmalpipette
für die Entnahme von flüssigem Stuhlmaterial und für die Stuhlverarbeitung (1 ml)		
Bestell-Nr.: 8493/3	(VE = 50 Stück)	Einmalpipette
für die Entnahme von flüssigem Stuhlmaterial und für die Stuhlverarbeitung (3 ml)		
Bestell-Nr.: 8494	(VE = 50 Stück)	Wattestäbchen
für die Stuhlverarbeitung		
Bestell-Nr.: 8511	(VE = 10 Stück)	Trichter
ergänzendes Zubehör für 7491 FLOT II BA 7492 ECO BA 7493 AF BA 7494 SAF BA 7495 Bailenger BA		

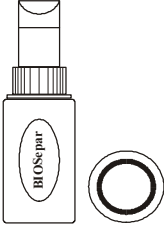
Bestell-Nr.: 8512	(VE = 10 Stück)	Schaufel
<p>ergänzendes Zubehör für 7491 FLOT II BA 7492 ECO BA 7493 AF BA 7494 SAF BA 7495 Bailenger BA</p>		

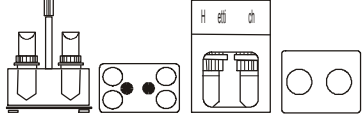
Bestell-Nr.: 8502	(VE = 1 Stück)	Laborgestell
<p>für die ParasiTrap Diagnostik (25 Löcher, in verschiedenen Farben, hitzebeständig, sterilisierbar)</p>		

Bestell-Nr.: 8503	(VE = 1 Stück)	Laborgestell
<p>für die ParasiTrap Grosstier- diagnostik (24 Löcher, für 50 ml Plastikgefäße, gelb, blau, rot, beige)</p>		

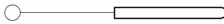
Bestell-Nr.: 8504	(VE = 1 Stück)	Schüttelgerät
<p>für die Biosepar-Arbeitstechnik in der parasitologischen Diagnostik und Forschung.</p>		

Ergänzendes Zubehör für die Zentrifugation


Bestell-Nr.: 8505	(VE = 1 Stück)	Röhrchenadapter
<p>Röhrchenadapter für Zentrifugeneinsätze</p>		


Bestell-Nr.: 8510	(VE = 1 Stück)	Zentrifugeneinsätze
<p>für das Stuhl diagnostik-System (Bitte Marke und Typ der Zentrifuge angeben!)</p>		


Ergänzendes Zubehör für die Flotation

Bestell-Nr.: 8501	(VE = 1 Stück)	Drahtöse
<p>für die Flotationstechnik</p>		


Ergänzendes Zubehör für die Mikroskopie

Bestell-Nr.: 8506	(VE = 50 Stück)	Objektträger
Geschnitten, Mattrand: 76 x 26 mm, 0,8-1,0 mm Stärke		

Bestell-Nr.: 8507	(VE = 50 Stück)	Deckgläser
24 x 36 mm besondere Eignung für die Parasitologie		


Bestell-Nr.: 8509	(VE = 50 Stück)	Deckgläser
24 x 60 mm besondere Eignung für die Parasitologie		

Verschlusskappen für Biosepar Röhrchen

Bestell-Nr.: 8482	Einheits-Verschlusskappe für A I und A II Röhrchen
Verschlusskappe für die kleinere Zentrifuge und die Qualitätskontrolle	

Braunglasflasche


Bestell-Nr.: 8487 E 30	(VE = 1 Stück)	Tropfer
-------------------------------	----------------	----------------

<p>Braunglasflasche (30 ml) mit graduiertem Tropfer für das ParasiTrap® Combi-Medium und Flotation PLUS Medium.</p>	
---	---


Bestell-Nr.: 8496/A	(VE = 1 Stück)	Braunglasflasche
----------------------------	----------------	-------------------------

<p>1000 ml für Medium A</p>		
---------------------------------	--	---

Bestell-Nr.: 8496/B	(VE = 1 Stück)	Braunglasflasche
----------------------------	----------------	-------------------------

<p>500 ml für Medium B</p>		
--------------------------------	--	--

Bestell-Nr.: 8496/C	(VE = 1 Stück)	Braunglasflasche
----------------------------	----------------	-------------------------

<p>250 ml für Medium C</p>		
--------------------------------	--	--