

Produktkatalog I

2009-2010



BIOSEPAR

Gesellschaft für Medizin- und Labortechnik mbH

Hauptgeschäftsstelle

Am Industriepark 3, D-84453 Mühldorf am Inn

Export-Büro München

Otto-Heilmann-Str. 2, Postfach 1344, D-82027 Grünwald bei München

Telefon: +49 (0) 8631 167 48 55, Fax: +49 (0) 8631 167 48 57

E-Mail: mail@biosepar.de

Internet: www.biosepar.de

Wissenswertes über das Biosepar ParasiTrap[®]-Diagnostik-System



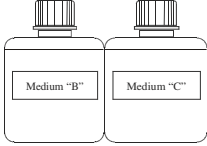
Das **Biosepar-ParasiTrap[®]-Diagnostik-System** ist das Ergebnis einer jahrelangen Forschungsarbeit im Max-von-Pettenkofer-Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität München. Es wurde entwickelt, um die unangenehme und infektionsgefährdete Stuhlverarbeitung im Labor zu erleichtern, sicherer zu machen und die Trefferquote dauerhaft optimal zu gestalten. Die rationelle Arbeitsweise erlaubt auch größere Serien von Probenmaterialien in kurzer Zeit aufzuarbeiten, wodurch wertvolle Arbeitszeit eingespart werden kann.

Das **Biosepar-ParasiTrap[®]-Diagnostik-System** ist in Bezug auf Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, Standardisierbarkeit und Sensitivität marktführend und wird im In- und Ausland in vielen Labors mit großem Erfolg tagtäglich verwendet. Es erfüllt alle Kriterien des modernen Qualitätsmanagements.



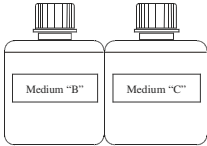



Nicht nur die Trefferquoten, sondern auch die Qualität der mikroskopischen Gesichtsfelder sind hervorragend, wodurch auch beim Mikroskopieren viel Zeit bei der gleichzeitig hohen diagnostischen Sicherheit eingespart wird. Das Handling ist einfach, die Untersuchung kann jederzeit auch für längere Zeit unterbrochen werden, eine Kühlung ist nicht notwendig. Bei vorschriftsmäßiger Verwendung besteht keine Infektionsgefahr, auch gibt es keine störenden Emissionen (Geruchsbelästigung, org. Lösungsmittel), die MAK-Werte bleiben im Normbereich. Die vielen Vorteile des **Biosepar-ParasiTrap[®]-Diagnostik-Systems** kann man erst während des Gebrauchs voll erkennen. Bei Fragen, auch fachlicher Art, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Auch für eine Schulung bei Ihnen im Labor sind wir gerne bereit, zu Ihnen zu kommen. Die geschulten MTAs und Ihr Labor bekommen von uns über diese Fortbildung ein Zertifikat.

PARASITOLOGIE



ParasiTrap® - Super Combipack Comfort - System FixSepar® ECO

Bestell-Nr.: 8484 ECO		(VE = 50 Stück/Box)	Super-Kombi-System	
	+		+	
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium FixSepar ECO)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)		Medium B, Medium C (inkl. der notwendigen Mengen)


ParasiTrap® - Premium Combipack Comfort - System FixSepar® ECO



Bestell-Nr.: 8486 ECO		(VE = 50 Stück/Box)	Premium-Kombi-System	
	+		+	
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium FixSepar ECO)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)		Medium B, Medium C (inkl. der notwendigen Mengen)
		+		
				
Stuhllöffel		Einmalpipetten		Wattestäbchen

ParasiTrap[®] FixSepar[®] ECO Stuhldiagnostik-System



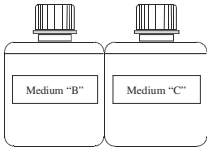
Bestell-Nr.: 8488 ECO	(VE = 50 Stück/Box)	Komplett-System
	+	
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium FixSepar ECO)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)

ParasiTrap[®] - Einzelne Röhrchen FixSepar[®] ECO



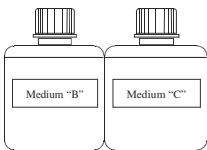
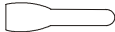


Bestell-Nr.: 8490 ECO	(VE = 50 St./Box)	Arbeitsröhrchen I
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium FixSepar ECO)		

Bestell-Nr.: 8491	(VE = 50 St./Box)	Arbeitsröhrchen II
Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem) Filterfarbe: schwarz oder grün	 	

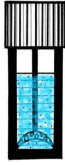

ParasiTrap® - Super Combipack Comfort - System

Bestell-Nr.: 8484		(VE = 50 Stück/Box)	Super-Kombi-System
	+		+
			
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium AF/SAF)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Medium B, Medium C (inkl. der notwendigen Mengen)


ParasiTrap® - Premium Combipack Comfort - System

Bestell-Nr.: 8486		(VE = 50 Stück/Box)	Premium-Kombi-System
	+		+
			
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium AF/SAF)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)	Medium B, Medium C (inkl. der notwendigen Mengen)
	+		
			
Stuhllöffel		Einmalpipetten	Wattestäbchen

ParasiTrap® Stuhldiagnostik-System


Bestell-Nr.: 8488	(VE = 50 Stück/Box)	Komplett-System
	+	
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium AF/SAF)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)

ParasiTrap® - Einzelne Röhrchen



Bestell-Nr.: 8490	(VE = 50 St./Box)	Arbeitsröhrchen I
Arbeitsröhrchen I (gefüllt mit 3,5 ml Medium AF/SAF)		

Sonderanfertigung auf Wunsch
ParasiTrap® Ungefülltes - System

Bestell-Nr.: 8489	(VE = 50 St./Box)	Arbeitsröhrchen I
--------------------------	-------------------	--------------------------

Arbeitsröhrchen I (ungefüllt)	
---	--


Bestell-Nr.: 8487	(VE = 50 Stück/Box)	Ungefülltes-System
--------------------------	---------------------	---------------------------

	+	
Arbeitsröhrchen I (ungefüllt)		Arbeitsröhrchen II (mit integriertem Filtersystem)

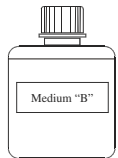
Biosepar Medien für das **ParasiTrap®** Diagnostik-System

ACHTUNG! Das Medium FixSepar® ECO ist nur in vorgefüllten Arbeitsröhrchen I erhältlich.


Bestell-Nr.: 8487/A		Medium A
Transport- und Verarbeitungsmedium		

	Medium AF/SAF (Formalinhaltig)
---	---------------------------------------

Bestell-Nr.: 8487/B		Medium B
Trennmedium		

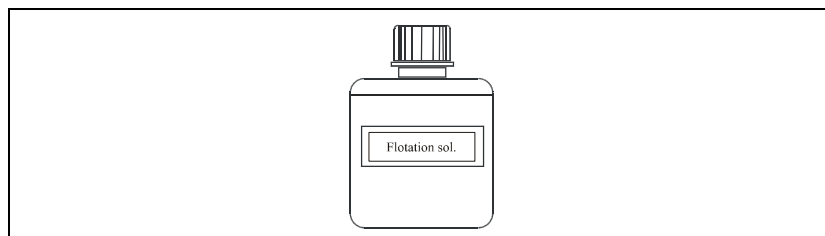
	Ethylacetat
---	--------------------

Bestell-Nr.: 8487/C		Medium C
Färbemedium		

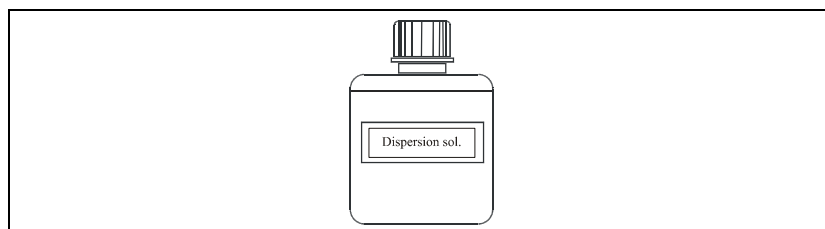
	ParasiTrap-Lugol (Speziell für die Parasitologie hergestellt und modifiziert.)
---	--

Besondere spezielle Arbeits- und Fixationsmedien für das **ParasiTrap®** Diagnostik-System

Bestell-Nr.: 8500	Flotationslösung
--------------------------	-------------------------



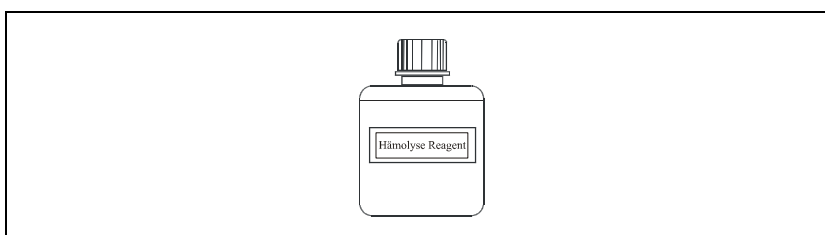
Bestell-Nr.: 8535	Lösung für Materialverdünnung in der parasitologischen Stuhldiagnostik
--------------------------	---



Bestell-Nr.: 8536	Isopropanol 70 % Lösung für Desinfektion
--------------------------	---

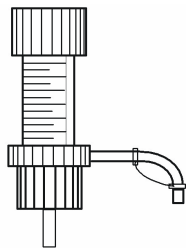


Bestell-Nr.: 8514	Hämolyse-Reagenz
--------------------------	-------------------------

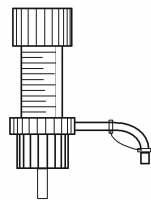


Flaschenaufsatzdispenser

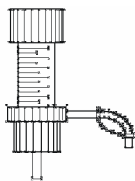
Bestell-Nr.: 8495/AF/SAF	(VE = 1 Stück)	Flaschenaufsatzdispenser
---------------------------------	----------------	---------------------------------

2,0-10,0 ml (für Medium AF/SAF)	
------------------------------------	--

Bestell-Nr.: 8495/B	(VE = 1 Stück)	Flaschenaufsatzdispenser
----------------------------	----------------	---------------------------------


1,0-5,0 ml (für Medium B)	
------------------------------	--

Bestell-Nr.: 8495/C	(VE = 1 Stück)	Flaschenaufsatzdispenser
----------------------------	----------------	---------------------------------


0,1-1,0 ml (für Medium C)	
------------------------------	--

Ergänzendes Zubehör für die Stuhlprobe (Parasitologie)

Bestell-Nr.: 8492	(VE = 50 Stück)	Stuhlöffel
--------------------------	-----------------	-------------------

für die Entnahme unter schwierigen Bedingungen		
--	--	--

Bestell-Nr.: 8493	(VE = 50 Stück)	Einmalpipetten
--------------------------	-----------------	-----------------------

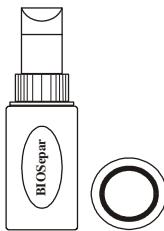
für die Entnahme von flüssigem Stuhlmaterial und für die Stuhlverarbeitung		
---	--	--

Bestell-Nr.: 8494	(VE = 50 Stück)	Wattestäbchen
--------------------------	-----------------	----------------------

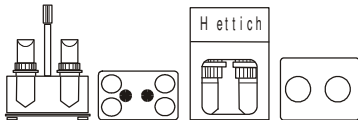
für die Stuhlverarbeitung		
------------------------------	--	--

Ergänzendes Zubehör für die Zentrifugation

Bestell-Nr.: 8504	(VE = 1 Stück)	Röhrchenadapter
--------------------------	----------------	------------------------

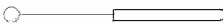
Biosepar-Röhrchenadapter für Zentrifugeneinsätze		
---	--	--

Bestell-Nr.: 8510	(VE = 1 Stück)	Zentrifugeneinsätze
--------------------------	----------------	----------------------------

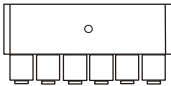
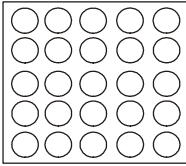
für das Stuhl diagnostik-System (Bitte Marke und Typ der Zentrifuge angeben!)		
--	--	--

Ergänzendes Zubehör für die Flotation

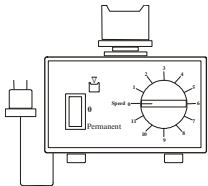
Bestell-Nr.: 8501	(VE = 1 Stück)	Drahtöse
--------------------------	----------------	-----------------

für die Flotationstechnik	
---------------------------	--

Bestell-Nr.: 8502	(VE = 1 Stück)	Laborgestell
--------------------------	----------------	---------------------

in der parasitologischen Diagnostik für 25 Röhrchen (in verschiedenen Farben, hitzebeständig, sterilisierbar) (weiss, grün, rot, blau, lila, orange)	 
---	--


Bestell-Nr.: 8503	(VE = 1 Stück)	Schüttelgerät
--------------------------	----------------	----------------------

für die Biosepar- Arbeitstechnik in der parasitologischen Diagnostik und Forschung	
--	--



Ergänzendes Zubehör für die Mikroskopie


Bestell-Nr.: 8506	(VE = 50 Stück)	Objektträger
--------------------------	-----------------	---------------------

Geschnitten, Mattrand: 76x26 mm, 0,8-1,0 mm Stärke	
--	--

Bestell-Nr.: 8507	(VE = 50 Stück)	Deckgläser
--------------------------	-----------------	-------------------


24x36 mm besondere Eignung für die Parasitologie	
--	--

Bestell-Nr.: 8509	(VE = 50 Stück)	Deckgläser
--------------------------	-----------------	-------------------

24x60 mm besondere Eignung für die Parasitologie	
--	--


Verschlusskappen für Biosepar Röhrchen

Bestell-Nr.: 8482	Einheits-Verschlusskappe für A I und A II Röhrchen
--------------------------	---

Verschlusskappe für das ParasiTrap System	
--	--

Braunglasflasche für Dispenser


Bestell-Nr.: 8496/A	(VE = 1 Stück)	Braunglasflasche
----------------------------	----------------	-------------------------

1000 ml für Medium A	
-------------------------	---

Bestell-Nr.: 8496/B	(VE = 1 Stück)	Braunglasflasche
----------------------------	----------------	-------------------------

500 ml für Medium B	
------------------------	--

Bestell-Nr.: 8496/C	(VE = 1 Stück)	Braunglasflasche
----------------------------	----------------	-------------------------

250 ml für Medium C	
------------------------	---

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Allgemeines

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Die Verkaufsbedingungen gilt auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Wird in Bezug auf einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen ausdrücklich eine abweichende Regelung getroffen, so wird hiervon die Gültigkeit im Übrigen nicht berührt.

Angebot – Angebotsunterlagen

Unsere Angebote sind freibleibend. Soweit nichts anderes vereinbart, ist für den Umfang der vertraglich geschuldeten Leistung unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Die in unseren Prospekten, Beschreibungen und Angebotsunterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten, Maß- und Leistungsbeschreibungen sind nur als Annäherungswerte zu verstehen, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Technische Änderungen unserer Produkte bleiben ausdrücklich vorbehalten. An Werkzeugen und Einrichtungen behalten wir uns Eigentumsrechte vor. Dies gilt auch für solche Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Die Weitergabe an Dritte bedarf unserer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung.

Preise – Zahlungsbedingungen

Die Preise gelten soweit nichts anderes vereinbart „ab Werk“ zzgl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung. Die Bezahlung erfolgt zu der jeweils festgelegten Zahlungsbedingungen. Sind diese nicht bestimmt worden, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 21 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Falls aufgrund vorheriger Vereinbarung, Wechsel oder Schecks in Zahlung genommen werden, gehen die Spesen für Diskont, Einzug usw. zu Lasten des Kunden. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens jedoch in Höhe von 8% über dem Basisersatz vom Rechnungsbetrag zu berechnen. Für den Fall, dass sich die Herstellungskosten für Waren oder Leistungen, die später als 4 Monate nach Vertragsabschluss geliefert oder erbracht werden sollen, durch Erhöhung der Grundstoffpreise um mindestens 5% erhöhen, behalten wir uns das Recht vor, die ursprünglich vereinbarten Preise entsprechend anzupassen.

Lieferbedingungen – Lieferverzug

Die angegebenen Lieferfristen sind keine Fixtermine, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Sämtliche Lieferungen verstehen sich ab Werk und reisen auf Gefahr des Kunden auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Im Falle von Streik, Aussperrung, Rohstoff- und Energiemangel, Verkehrs- und unvermeidlichen Betriebsstörungen sowie aller sonstigen Fälle höherer Gewalt, sind wir berechtigt, nach unserer Wahl die Lieferzeit angemessen zu verlängern oder ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Bei von uns verschuldeter Überschreitung der Lieferfrist kann der Käufer nach Ablauf einer von ihm schriftlich zu setzenden angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Für Ansprüche auf Schadenersatz gilt: siehe Haftungsbeschränkung.

Gewährleistung

Der Kunde muss uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Ist der Liefergegenstand im Zeitpunkt des Gefahrübergangs mangelhaft, so liefern wir nach unserer Wahl Ersatz oder bessern nach. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig. Ist die Nacherfüllung/Nachbesserung fehlergeschlagen, so ist der Kunde – soweit sich aus einer Garantieübernahme nichts anderes ergibt – nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Für Ansprüche auf Schaden- und Aufwendungsersatz wegen eines Mangels gilt: siehe Haftungsbeschränkung.

Die Gewährleistungsfrist bei unseren Produkten beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Datum und Lieferung, außer, am Produkt sind andere Fristen angegeben.

Haftungsbeschränkung

Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits, sowie bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Im Fall der Verletzung wesentlicher Rechte und Pflichten, wesentlicher oder grundlegender Vertrags- oder grundlegender Neben- oder Schutzpflichten haften wir bei einfacher Fahrlässigkeit, begrenzt auf den vertragstypischen, unmittelbaren und vorhersehbaren Durchschnittsschaden. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB. Nicht betroffen von den Haftungsbeschränkungen sind Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung sowie aus Garantieübernahmen. Der Haftungsausschluss greift auch bei Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Befriedigung unserer Ansprüche – auch der zukünftigen – aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Die dem Kunden aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an Dritte erwachsenden Forderungen werden zur Sicherung unserer Ansprüche bereits jetzt in Höhe der den Dritten berechneten Beträge abgetreten. Die dem Kunden generell erteilte Einziehungsermächtigung erlischt, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen nicht mehr ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Kunde uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen anzugeben und ihnen die Abtretung anzuzeigen. Übersteigen die Sicherungen unsere zu sichernden Ansprüche um mehr als 10%, so werden wir die darüber hinausgehenden Sicherungen auf Antrag freigeben.

Vertragsschluss

Jede Vereinbarung mit unseren Vertretern bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Dies gilt im Besonderen für von den Vertretern angenommene Aufträge.

Anwendbares Recht – Vertragssprache – Gerichtsstand

Für diese Verkaufsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Werden dem Kunden diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen außer in deutscher Sprache auch in einer anderen Sprache bekannt gegeben, so ist bei Übersetzungs-/Auslegungsunterschieden ausschließlich der deutsche Text maßgeblich. Die Übersetzung in eine andere Sprache dient allein zur Erleichterung des Verständnisses. Gerichtsstand ist auch für Wechsel- und Schecklagen für etwaige Streitigkeiten mit Vollkaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen je nach sachlicher Zuständigkeit das Amtsgericht bzw. das Landgericht München oder nach unserer Wahl der allgemeine Gerichtsstand des Kunden.